

HJ-005-E

OMRON

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ШАГОМЕР



A Good Sense of Health

МОДЕЛЬ
OMRON HJ-005-E

Шагомер Omron HJ-005-E позволяет Вам следить за числом шагов, которые вы делаете во время ходьбы или бега трусцой. Прибор может сосчитать до 99 999 шагов.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-------|
| 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАГОМЕРА | 3 |
| 2. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ | 4 |
| 3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ | 5 |
| 4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА | 10 |
| 5. УХОД И ХРАНЕНИЕ | 12 |
| 6. СБОИ В РАБОТЕ: ПРИЧИНЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ | 19 |
| 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 20 |
| АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ OMRON HEALTHCARE В РОССИИ | 22 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | 15-17 |

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАГОМЕРА

1.1. Общие рекомендации

- храните прибор в месте, недоступном для маленьких детей


1.2. Начальные рекомендации по использованию прибора

- располагайте прибор непосредственно на передней стороне Вашего тела
- держите прибор в закрытом состоянии
- используйте крепкую обувь
- ходите или бегайте твердым шагом
- избегайте ходьбы и бега в местах большого скопления людей
- движения вверх и вниз могут привести к некорректным результатам.

1.3. Меры предосторожности

- не подвергайте прибор колебательным нагрузкам
- соблюдайте осторожность, чтобы не наступить на прибор
- не раскрывайте чрезмерно широко и не перекручивайте клипсу прибора
- не открывайте слишком широко крышку прибора
- содержите прибор в сухом состоянии
- условия окружающей среды должны исключать воздействие на прибор излишних вибраций, ударов.

2. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

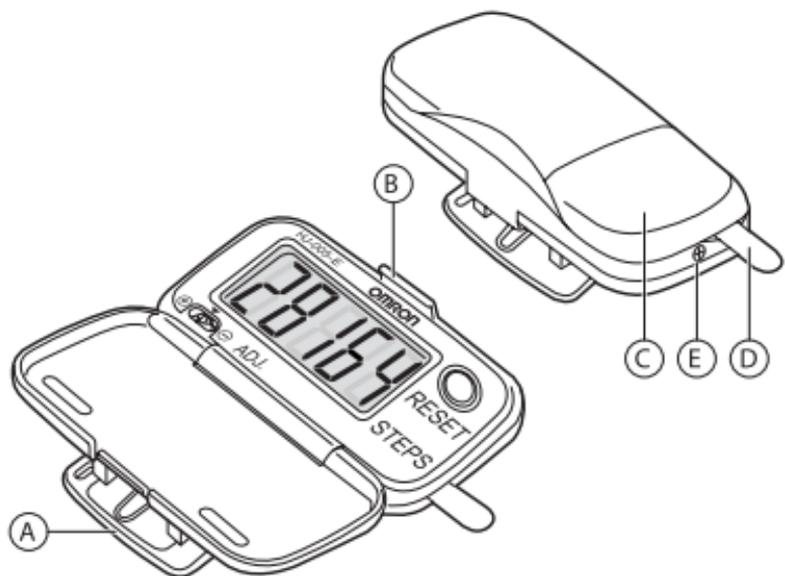

A - клипса

B - защелка крышки

C - крышка батарейного отсека

D - изоляционная прокладка

E - винт фиксации крышки батарейного отсека

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1. Панель управления

F - Дисплей


G - регулятор чувствительности

H - кнопка "reset" (сброс)




3.2. Первое включение прибора

1. Откройте крышку.
2. Отклейте предохранительную пленку.
3. Вытяните изоляционную прокладку.

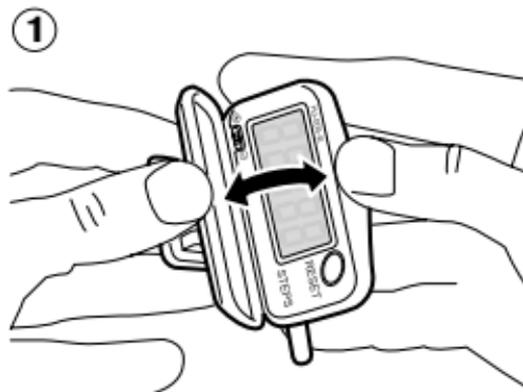

Примечание.

Прибор включается благодаря извлечению изоляционной прокладки.

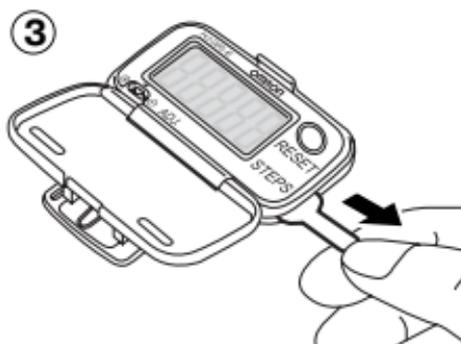


3.3. Как носить шагомер

1. Закройте крышку.
2. Прикрепите прибор с помощью клипсы к поясу Ваших брюк, ремню или краю верхнего переднего кармана одежды.

Примечание.

Чтобы обеспечить надежный счет, держите прибор вертикально. Не располагайте прибор на /в заднем кармане Ваших брюк.

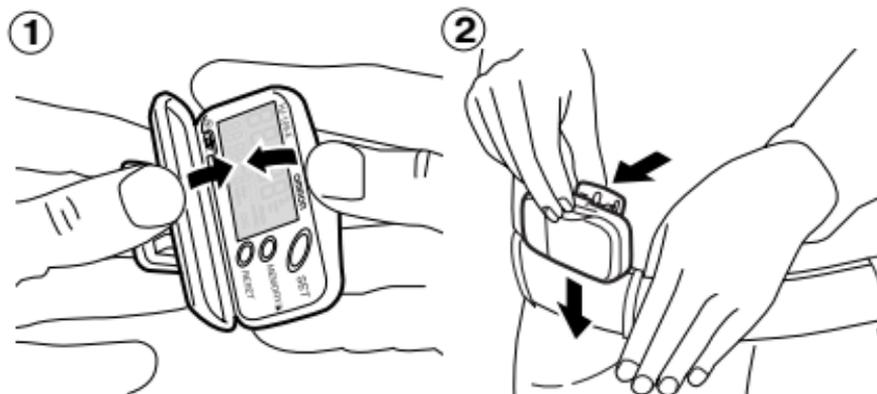







3.4. Подстройка чувствительности

1. Откройте прибор.
2. Нажмите кнопку "reset".
3. Закройте прибор и пройдите 100 шагов.
4. Откройте прибор и проверьте число шагов, отображенное на дисплее.
5. Передвиньте регулятор чувствительности к "-", если число шагов на дисплее равно 105 или более. Передвиньте регулятор чувствительности к "+", если число шагов 95 или менее.
6. Закройте прибор и пройдите 100 шагов.
7. Откройте прибор и проверьте число шагов.

Примечание.

Если разница все еще превышает ± 5 , повторите подстройку чувствительности.

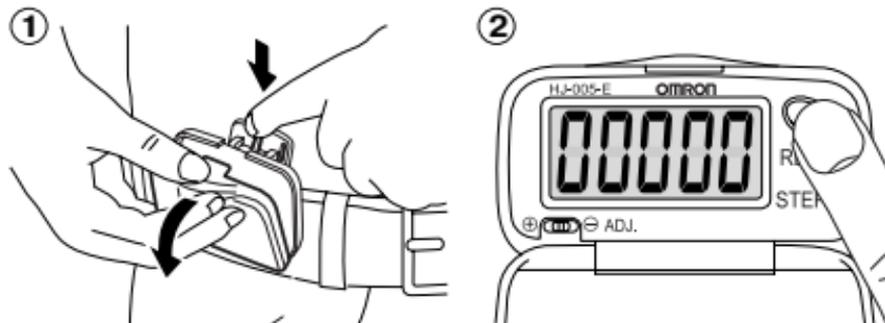

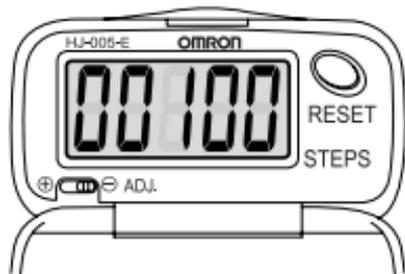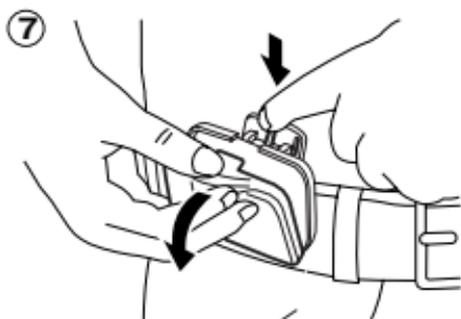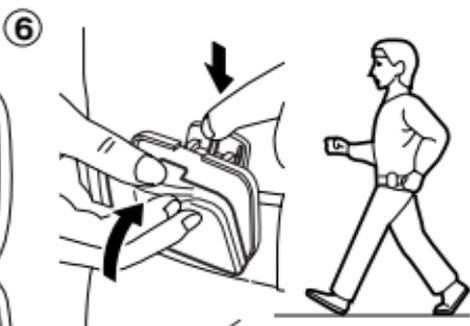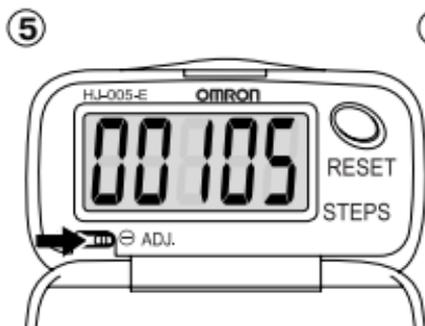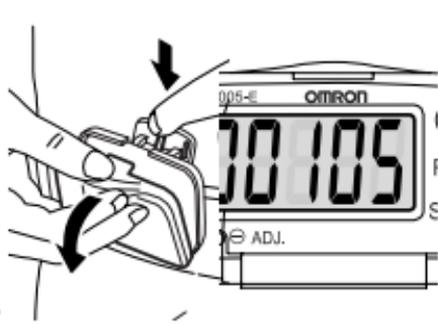

4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Откройте прибор.
2. Нажмите кнопку "reset".
3. Закройте прибор и начинайте ходьбу или бег трусцой.


Примечание.

При изменении темпа или формы движения подстройте чувствительность.

4. Откройте прибор и прочитайте результат.

Примечание.

Полученный результат изменить невозможно, только удалить.

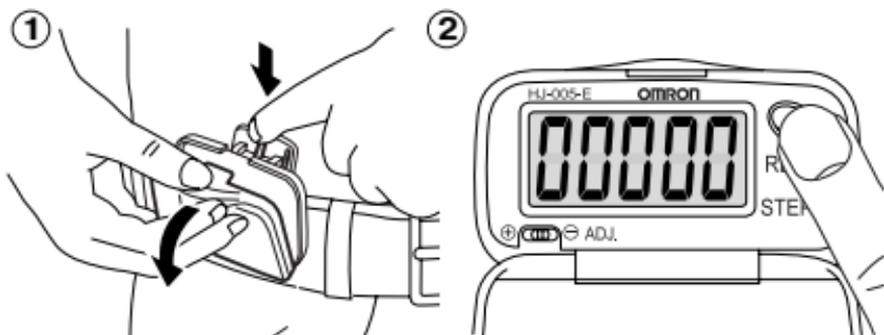

5. УХОД И ХРАНЕНИЕ

5.1. Замена элемента питания.

1. Удалите крышку батарейного отсека.

Примечание.




Пользуйтесь крестовидной отверткой типа "Филипс".

2. Извлеките элемент питания из батарейного отсека и установите новый элемент типа LR 43 на 1,5 В.

Внимание!

Не пользуйтесь металлическими предметами для извлечения элемента питания из батарейного отсека!

3. Установите крышку батарейного отсека и зажмите ее винтом.

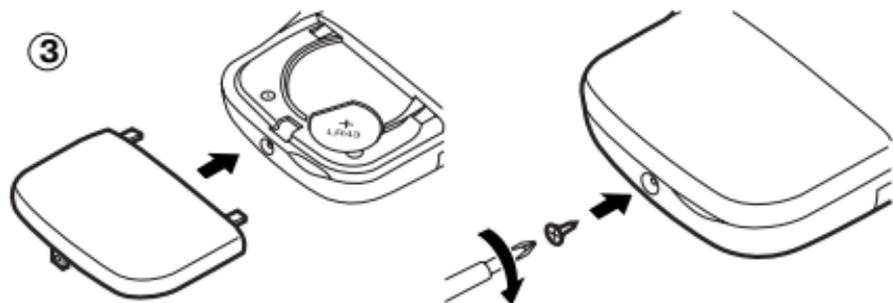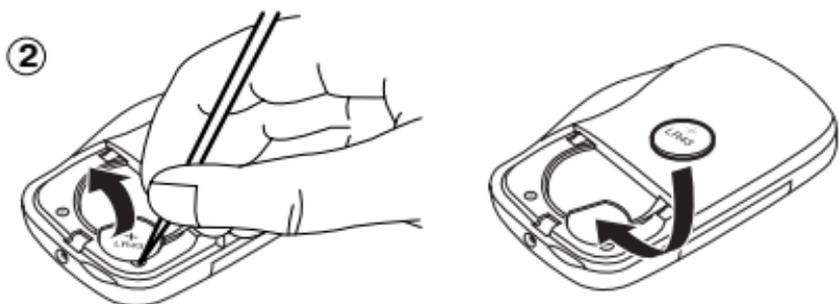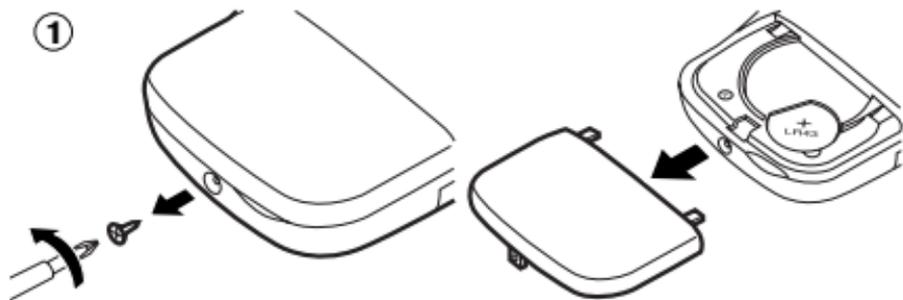

Для чистки шагомера Omron HJ-005-E пользуйтесь мягкой слегка увлажненной тканью.

Внимание!

Не пользуйтесь бензином, разбавителями красок и другими подобными растворителями!

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор.

Храните прибор в сухом закрытом месте.

Извлеките элемент питания, если Вы не собираетесь пользоваться прибором более 2 месяцев.

Внимание!

Утилизация элементов питания и прибора Omron HJ-005-E должна производиться в соответствии с национальными требованиями по утилизации электронной техники.



Г А Р А Н Т И Й Н Ы Й Т А Л О Н

Срок гарантии 5 лет

В Н И М А Н И Ю П О К У П А Т Е Л Е Й

1. Центры технического обслуживания по гарантии осуществляют бесплатную замену вышедших из строя запасных частей и другие ремонтные работы в течение 5 лет с момента покупки аппарата.
2. Гарантия теряет силу в случаях:
 - нарушения требований Руководства по эксплуатации;
 - наличия механических повреждений, попадания в аппарат влаги или возникновения дефектов, вызванных стихийными бедствиями;
 - самостоятельного вскрытия аппарата владельцем или третьими лицами;
 - неправильного заполнения гарантийных талонов, наличия в них подчисток и незавершенных исправлений;
 - подключения к электросети через сетевые адаптеры, не рекомендованные фирмой "КомплектСервис", или возникновения неисправностей из-за перенапряжения в электросети.
3. Гарантия не распространяется на элементы питания.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1

Модель _____

Заводской № _____ Дата покупки _____

ПРОИЗВЕДЕННЫЕ РАБОТЫ

| Наименование | Скл. номер | Цена за ед. | Кол-во |
|--------------|------------|-------------|--------|
| | | | |

Замененные детали

ДАТА РЕМОНТА

Подпись владельца

Подпись исполнителя

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2

Модель _____

Заводской № _____ Дата покупки _____

ПРОИЗВЕДЕННЫЕ РАБОТЫ

| Наименование | Скл. номер | Цена за ед. | Кол-во |
|--------------|------------|-------------|--------|
| | | | |

Замененные детали

ДАТА РЕМОНТА

Подпись владельца

Подпись исполнителя

Дата продажи _____

Штамп магазина

Подпись продавца _____

Изделие во всех режимах работы проверялось
в присутствии покупателя

Подпись покупателя _____

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 "...приборы и аппаратура медицинские входят в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации".

В соответствии с Законом "О защите прав потребителя" "...изготовитель или организация, выполняющая функции изготовителя на основании договора с ним, обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя, а в случае необходимости **провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара.**

При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара изготовитель или организация, выполняющая функции изготовителя, обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.

Если в результате экспертизы товара установлено, что недостатки возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения им установленных правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, потребитель обязан возместить изготовителю или организации, выполняющей функции изготовителя, расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара".

**АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ OMRON HEALTHCARE В РОССИИ**
приведены в конце настоящего Руководства по эксплуатации

6. СБОИ В РАБОТЕ: ПРИЧИНЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

| Сбой | | Причины | Устранение |
|---|--------------------------------------|--|--|
| На дисплее отсутствует изображение | Низкое напряжение питания | Слабый/разряженный элемент питания | Установите новый элемент типа LR 43 на 1,5 В |
| На дисплее изображен символ  | | | |
| Необъяснимые величины | Неправильное пользование | Следуйте рекомендациям руководства по эксплуатации | |
| | Вы ходите нетвердым шагом | Ходите все время твердым шагом | |
| | Ошибки в начальных установках данных | Смените начальные установки | |

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|--|
| Наименование продукта | Шагомер |
| Модель | OMRON HJ-005-E |
| Источник питания | Элемент питания на 1,5 В типа LR43 |
| Диапазон измерений числа шагов | 0–99 999 |
| Условия эксплуатации: Температура окружающего воздуха | –10°C – +40°C |
| Точность отсчета числа шагов | ± 5% (по тестовому вибратору) |
| Габариты | 63,5x36,3x23 мм |
| Вес | 24 г (включая элемент питания) |
| Комплект поставки | электронный блок, литиевый элемент питания на 1,5 В типа LR43, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном |

Срок службы:

- электронного блока не менее 7 лет
- элемента питания устанавливает производитель элементов питания или 1 год при ежедневном использовании с результатом 10000 шагов.

В интересах улучшения продукции технические данные могут быть изменены без уведомления потребителя.

Прибор соответствует всем требованиям безопасности, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

— **ГОССТАНДАРТ РФ:**

Орган по сертификации средств информатизации, приборостроения, медицинской техники и электрооборудования (ОС «Сертинформ ВНИИНМАШ»)
Сертификат соответствия: № РОСС JP.ME20.C00357
от 14.03.2007 г.

Соответствуют требованиям:

ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95)

**АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ OMRON В РОССИИ**

**ЗАО «КомплектСервис» —
эксклюзивный дистрибьютор и импортер
медицинской техники OMRON в России**

Адрес и телефоны Центра технического
обслуживания OMRON: 127006, Москва,
Воротниковский пер., д. 7, стр. 3 (м. "Маяковская")

Тел/факс: (495) 699-40-64

E-mail: info@csmedica.ru,
service@csmedica.ru (сервисный центр)

www.csmedica.ru

Часы работы Центра технического
обслуживания OMRON:
ежедневно с 9.30 до 18.00 (без перерыва на обед),
кроме сб., вс. и праздничных дней

OMRON

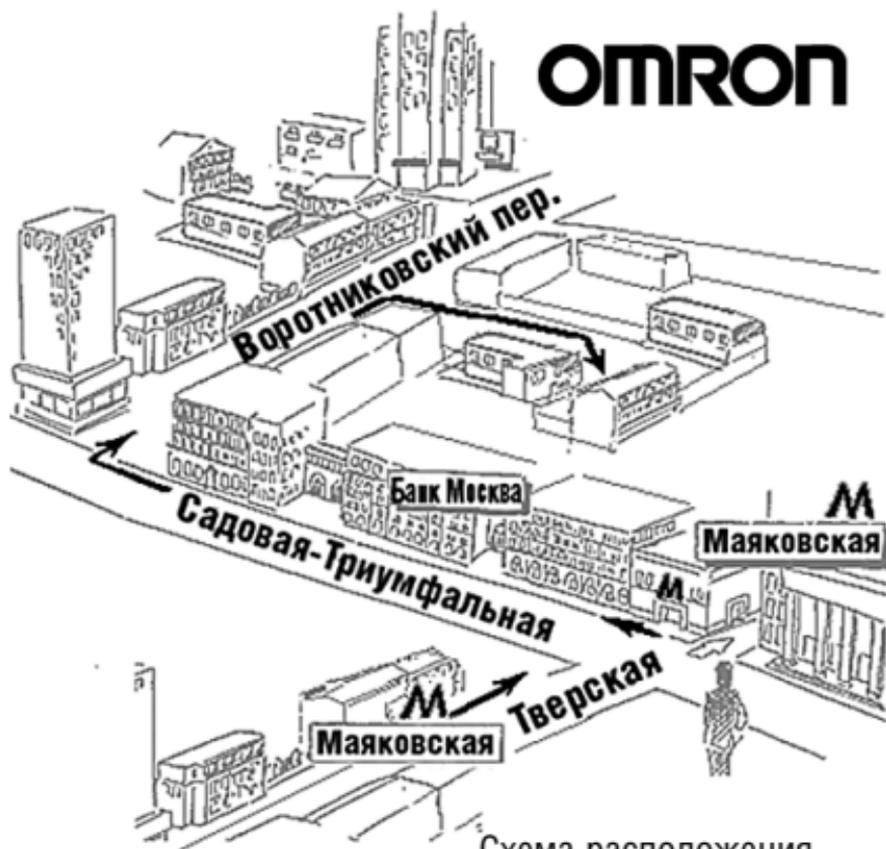


Схема расположения
Центра технического
обслуживания OMRON

- Архангельск, "СиЭс Медика Поморье", пр. Дзержинского, д. 8, корп. 1, оф. 3, тел.: (8182) 67-25-26, cspomor@atknet.ru
- Астрахань, "СиЭс Медика Астрахань", ул. Боевая, д. 134, оф. 2, тел.: (8512) 38-20-78, csmedica30@mail.ru
- Баку (Азербайджан), "Фарм Депо-22", ул. Внешне-Кольцевая, д. 4, тел.: (99412) 62-58-92, 62-84-41, eldargar@mail.ru
- Барнаул, "СиЭс Медика Алтай", ул. С-Западная, д. 171, тел/факс: (3852) 49-98-93, 60-14-31, cs-barnaul@mail.ru, gorkaev@barnaul.ru
- Белгород, филиал "СиЭс Медика Черноземье" (Воронеж), ул. Пирогова, д. 45, тел.: (4722) 75-36-10, cs-belmed@mail.ru
- Благовещенск, филиал "СиЭс Медика Восток" (Иркутск), ул. Горького, д. 118, оф. 3, тел.: (4162) 51-52-16, csmedica@amur.ru
- Братск, филиал "СиЭс Медика Восток" (Иркутск), ул. Гагарина, д. 16, оф. 4, тел.: (3953) 41-33-81, доб. 231, csmedica@bratsk.ru
- Владивосток, филиал "СиЭс Медика Восток" (Иркутск), пр. 100-летия Владивостока, д. 56, к. 21, тел.: (4232) 37-00-57, csmedica-dv@mail.ru
- Владимир, "Ольвия", ул. Батурина, д. 39, оф. 303, тел.: (4922) 23-68-38, 37-31-64, medteh@olvia.vinfo.ru
- Волгоград, "СиЭс Медика Нижняя Волга", ул. Землянского, д. 7, оф. 17, тел.: (8442) 24-34-49, 23-13-06, csmedica34@mail.ru
- Вологда, "СиЭс Медика Вологда", ул. Чехова, д. 4, тел.: (8172) 75-45-76, csmedika@vologda.ru
- Воронеж, "СиЭс Медика Черноземье", ул. Грамши, д. 73"а", тел.: (4732) 39-31-47, 39-18-54, voronezh@csmedica.vrn.ru
- Екатеринбург, "СиЭс Медика Урал", ул. 8 Марта, д. 5, оф. 117, тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, med@csmedica-ural.ru
- Иваново, "СиЭс Медика Иваново", ул. Колесанова, д. 11/2, тел.: (4932) 29-08-74, csmedica-ivanovo@mail.ru

- Ижевск, филиал "СиЭс Медика Вятка" (Киров), ул. Школьная, д. 1, тел.: (3412) 36-76-60, csm18@mail.ru
- Иркутск, "СиЭс Медика Восток", ул. Трилиссера, д. 87, оф. 8, тел.: (3952) 20-66-87, 20-51-41, vostok@csmedicairk.ru, market@omronirk.ru
- Йошкар-Ола, филиал "СиЭс Медика Поволжье" (Н. Новгород), ул. Первомайская, д. 106, тел.: (8362) 42-65-81, csm@mari-el.ru
- Казань, "СиЭс Медика Татарстан", ул. Гвардейская, д. 16"б", тел.: (843) 295-39-78, 295-34-55, csmedica16@mail.ru
- Калининград, "СиЭс Медика Калининград", ул. Нарвская, д. 49 "е", оф. 208, 206, тел.: (4012) 95-38-65, cs-medika@mail.ru
- Калуга, "СиЭс Медика Калуга", ул. Суворова, д. 21, оф. 31, тел.: (4842) 74-15-13, csmedica_kaluga@mail.ru
- Кемерово, "СиЭс Медика Сибирь" (Новосибирск), Октябрьский пр-т, д. 39, тел.: (3842) 59-22-02, nikitin_cs@mail.ru
- Киров, "СиЭс Медика Вятка", ул. Солнечная, д. 15, тел.: (8332) 51-36-26, 51-36-25, cs43@mail.ru
- Краснодар, "СиЭс Медика Кубань", ул. Дзержинского, д. 40, тел.: (861) 210-01-92, 210-01-35, cs_medica@kubannet.ru
- Красноярск, "СиЭс Медика Енисей", ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 602, тел.: (3912) 58-54-94, 21-24-83, 21-20-72, info@csmedicaenisey.ru
- Курск, филиал "СиЭс Медика Черноземье" (Воронеж), ул. Дубровинского, д. 1 "а-1", тел.: (4712) 52-05-09, cs-kursk@rambler.ru
- Липецк, филиал "СиЭс Медика Черноземье" (Воронеж), ул. 8 марта, д. 26"а", тел.: (4742) 23-04-69, cs_lip@mail.ru
- Магнитогорск, филиал "СиЭс Медика Урал" (Екатеринбург), пр. К. Маркса, д. 113/1, тел.: (3519) 29-49-14

- Минеральные Воды, филиал "СиЭс Медика Ставрополь", ул. Почтовая, д. 23"а", тел.: (87922) 5-52-34
- Минск (Беларусь), Иностранное Предприятие "ВЛАТЕ-Групп", ул. Румянцева, д. 7, каб. 16, тел.: (+375 17) 294-51-28, 290-40-76, 294-51-28, vlatek@yandex.ru
- Нижний Новгород, "СиЭс Медика Поволжье", ул. Торговая, д. 12, тел.: (831) 278-06-84, 278-06-89, csmedica@csmedica.nnov.ru
- Новокузнецк, "СиЭс Медика Сибирь" (Новосибирск), ул. Батюшкова, д. 14, тел.: (3843) 71-56-05, 35-94-92, novokuznetsk@csmedica.ru
- Новосибирск, "СиЭс Медика Сибирь", ул. Немировича-Данченко, д. 169, тел.: (383) 346-18-11, 346-20-68, cs-siberia@mail.ru
- Омск, "СиЭс Медика Омск", ул. Волочаевская, д. 15, корп. 1, тел.: (3812) 22-03-17, 51-54-21, csmedika_omsk@mail.ru
- Орел, филиал "СиЭс Медика Черноземье" (Воронеж), Крамской пр-д, д. 2, оф. 208, тел.: (4862) 72-61-01, orel-cs@mail.ru
- Оренбург, "СиЭс Медика Оренбург", ул. Цвиллинга, д. 46, оф. 8, тел.: (3532) 78-08-16, 94-62-28, csorenburg@mail.ru
- Орехово-Зуево "Си Эс Медика Подмосковье", Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул.Володарского, д. 80-а. , тел.: (496) 412-64-27, cspodmoskovie@mail.ru
- Пенза, "СиЭс Медика Пенза", ул. М. Горького, д. 23, тел. (8412) 56-18-37, 56-15-01, csmedica58@mail.ru
- Пермь, "СиЭс Медика Пермь", ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 224-52-19, 229-87-75, csperm@mail.ru
- Ростов-на-Дону, "СиЭс Медика Ростов-на-Дону", ул. Фурмановская, д. 148, тел.: (863) 231-03-85 (86), 231-04-85 (86), 231-07-87, csrostov@aanet.ru
- Рязань "СиЭс Медика Рязань", ул. Семена Середы, д. 42, тел.: (4912) 96-63-10, 96-93-66, ryazan@csmedica.ru

- Самара, "СиЭс Медика Самара", ул. Революционная, д. 70, стр. 1, оф. 24/2, тел.: (846) 267-31-00, 267-38-33, csmedica-samara@sama.ru
- Санкт-Петербург, "СиЭс Медика Северо-Запад" (продажа и техническое обслуживание), ул. Тимуровская, д. 17, к. 3, тел.: (812) 715-88-93, 8 (904) 515-22-30, csmedica@skylink.spb.ru
- Саранск, филиал "СиЭс Медика Поволжье" (Н. Новгород), ул. Васенко, д. 32, оф. 308, тел.: (8342) 27-03-24, csmedica@saransk.ru
- Саратов, "СиЭс Медика Саратов", пл. Орджоникидзе, д. 10"а", тел.: (8452) 96-17-32, 94-84-47, csmsaratov@mail.ru
- Смоленск, "СиЭс Медика Смоленск", Хлебозаводской пер. д. 13, тел.: (4812) 64-79-07, cs-smolensk@bk.ru
- Ставрополь, "СиЭс Медика Ставрополь", ул. Ленина, д. 484а, оф. 116, тел.: (8652) 56-42-63, 56-40-95, csmedicastv@mail.ru
- Старый Оскол, филиал "СиЭс Медика Черноземье" (Воронеж), ул. Ватутина, д. 54, тел.: (4725) 24-17-89, oskol_cs@mail.ru
- Тамбов, филиал "СиЭс Медика Черноземье" (Воронеж), ул. Чичканова, д. 17, тел.: (4752) 53-59-06, cs-tambov@mail.ru
- Тверь, "СиЭс Медика Тверь", пр-д Дарвина, д. 8, тел. (4822) 45-00-10, cs_medikatver@ocenter.ru
- Томск, "СиЭс Медика Енисей" (Красноярск), ул. Кулева, д. 32, оф. 110, тел.: (3822) 25-23-44, 42-44-28, tomsk@csmedicaenisey.ru
- Тула, "СиЭс Медика Тула", ул. Демонстрации, д. 19, тел.: (4872) 36-80-56, cs-tula@yandex.ru
- Тюмень, "СиЭс Медика Тюмень", ул. Амурская, д. 2/9, тел.: (3452) 30-48-17, cstumen@mail.ru
- Улан-Удэ, филиал "СиЭс Медика Восток" (Иркутск), ул. Свердлова, д. 12г, оф. 101, тел.: (3012) 21-82-29, csmedicabur@mail.ru

- Ульяновск, филиал "СиЭс Медика Поволжье" (Н. Новгород), Западный б-р, д. 27, оф. 101-102, тел.: (8422) 45-58-33, csmedica@mv.ru
- Уфа, "СиЭс Медика Башкортостан", ул. Натальи Ковшовой, д. 10, тел.: (347) 234-18-08, csmedica.ufa@mail.ru
- Хабаровск, филиал "СиЭс Медика Восток" (Иркутск), ул. Ким-Ю-Чена, д. 44, оф. 3, тел.: (4212) 41-12-65, csmedica_hab@mail.ru
- Чебоксары, филиал "СиЭс Медика Поволжье" (Н. Новгород), ул. Энгельса, д. 28, оф. 103, тел.: (8352) 21-24-08, 61-43-31, csmedica@chuvashia.ru, csmedica2@chuvashia.ru
- Челябинск, филиал "СиЭс Медика Урал" (Екатеринбург), ул. Свободы, д. 145, тел.: (351) 237-48-93, chel@omron-ural.ru
- Чита, филиал "СиЭс Медика Восток" (Иркутск), ул. Чайковского, д. 30, оф. 10, тел.: (3022) 32-49-03, csmedica-chita@mail.ru
- Шахты, филиал "СиЭс Медика Ростов-на-Дону" (Ростов-на-Дону), ул. Ионова, д. 110 "а", тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53
- Ярославль "СиЭс Медика Ярославль", ул. Лисицына д. 3 "А", тел.: (4852) 48-66-53, 93-13-99, cs-yar@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ОМРОН Healthcare, Co.,Ltd.
24 Yamanoshita-cho, Yamanouchi,
Ukuo-ku, Kyoto, 615-0084, Japan

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕВРОПЕ:

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.

(OMRON Хэлскэа Европа Б.В.)

Kruisweg 577 NL-2132 NA, Hoofddorp, Netherlands
(Крузизвег 577, НЛ-2132, Хуфдорп, Нидерланды).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФИЛИАЛЫ:

1. OMRON Dalian Co., Ltd

Plant 1:

No. 3 Song Jiang Road, Economic and Technical
Development Zone, Dalian 116600, China

2. OMRON Dalian

(OMRON Далиан Ко., Лтд)

Plant 2:

No. 33-42-1 Industry Ground, Economic and Technical
Development Zone, Dalian 116600, China

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Наряду с шагомерами компания OMRON производит целый спектр домашних медицинских приборов, помогающих сохранять здоровье и вести здоровый образ жизни как Вам, так и Вашей семье. Среди них:

- **электронные измерители артериального давления OMRON** полуавтоматические и автоматические.
- **ингаляторы OMRON** для ингаляционного лечения.

Одним из эффективных способов лечения **бронхиальной астмы и аллергии** является ингаляторная терапия.

При использовании ингалятора лекарственный препарат попадает непосредственно к органам дыхания, минуя кровь. Неблагоприятные побочные явления лекарства сводятся к минимуму.

Ингаляторная терапия значительно облегчает течение болезни в периоды ее обострений;

- **определитель жировых отложений OMRON BF 306** позволяет узнать точное количество и процентное содержание жира в организме;
- **медицинские массажеры OMRON** применяются для миотерапии при:
 - мышечной боли;
 - мышечной усталости;
 - напряжении в мышцах;
- **электронные термометры OMRON** для измерения температуры у детей безопасны для ребенка, не содержат вредных веществ и не бьются.

Будьте здоровы вместе с OMRON!

**ЗАО «КомплектСервис» –
эксклюзивный дистрибьютор
и импортер медицинской техники
OMRON в России**

**По вопросам реализации и закупок обращайтесь
по адресу: 119048, Москва, ул. Доватора, д. 2
Тел/факс: (495) 921-28-98, 785-06-85**

**По вопросам сервиса обращайтесь по адресу:
127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3
Тел/факс: (495) 699-40-64**

**Бесплатная горячая линия по России:
8-800-555-00-80**

**E-mail: info@csmedica.ru,
service@csmedica.ru (сервисный центр)
www.csmedica.ru**



**Зарегистрированный товарный знак
ЗАО «КомплектСервис»**

18.08.2008